
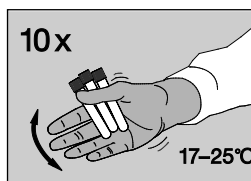


K použití se soupravou QuantiFERON-CMV ELISA (kat. č. 0350-0201).

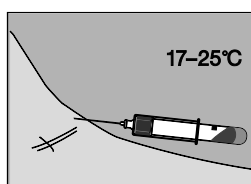

## QuantiFERON®-CMV

①

### Zkumavky pro odběr krve

Balení pro jednoho pacienta

Kat. č. 0192-0301

#### OBSAH

3x 1ml zkumavka pro odběr krve QF CMV (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x příbalový leták

Více informací najdete v *Příbalovém letáku QuantiFERON-CMV*, který se nachází na adrese [www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com).

#### ODBĚR KRVE

②

##### ⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Platí standardní zásady pro zacházení s krví.
- Zkumavky skladujte při 4–25 °C a v okamžiku použití musí mít teplotu okolního prostředí (17–25 °C).

Odeberte krev ze žíly.

*Pomocí vakua se zkumavka naplní po černou značku (1 ml). Krev může téct pomalu. Po ukončení odběru držte zkumavku na jehle po dobu 2–3 s. Jestliže krev nedosahuje až ke značce, krev doplňte.*

#### Technický tip

Motýlková jehla – před plněním zkumavek QuantiFERON-CMV naplňte hadičky pomocí plnicí zkumavky (není obsažena v dodávce).

#### ODBĚR KRVE

③

Okamžitě po naplnění 10x protřepejte zkumavky tak, aby došlo ke smočení celé vnitřní stěny zkumavek krví a rozpuštění antigenů na jejich stěně.




*Zkumavky by v době plnění krví měly mít teplotu 17–25 °C.*

*Příliš silné třepání může narušit gel a mohlo by vést k neplatným výsledkům.*

Označte zkumavky příslušným způsobem.



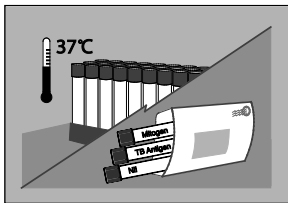

## ODESLÁNÍ / INKUBACE


④

Zkumavky odešlete do laboratoře při teplotě 17–27 °C. Krev se musí co nejdříve inkubovat při 37 °C (do 16 hodin od odběru).

*Personál laboratoře musí před inkubací při 37 °C zkumavky okamžitě promíchat.*

### MOŽNOST 1

#### Inkubace v laboratoři

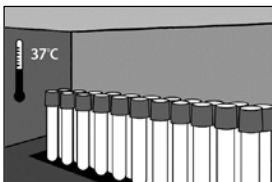

## ODESLÁNÍ / INKUBACE

⑤

Krev je nutné inkubovat co nejdříve (do 16 hodin od odběru). Zkumavky inkubujte ve vzpřímené poloze při 37 °C po dobu 16–24 hodin.

*Inkubátory může dodat společnost QIAGEN.*


### Technický tip

Vlhkost/CO<sub>2</sub> není nutná.

### MOŽNOST 2

#### Inkubace na pracovišti odběru

Jestliže brzy po odběru nebudou zkumavky inkubovány při 37 °C, je nutné okamžitě před inkubací zkumavky promíchat převrácením 10x.

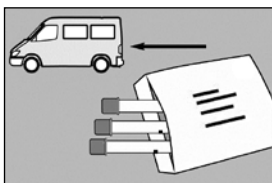

## ODESLÁNÍ / INKUBACE

⑥


Odešlete inkubované zkumavky do testující laboratoře (pokud nejsou odstředěné, tak do 3 dnů).

*Zkumavky uchovávejte při teplotě 4–27 °C.*

### Technický tip

Označte zkumavky jako „Inkubované“.

### MOŽNOST 2 (pokračování)

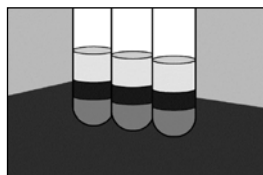

## ODSTŘEDĚNÍ

⑦

Před odběrem vzorků zkumavky odstředte.

*Otáčení nastavte na 2000–3000g po dobu 15 minut.*

Plazma v odstředěných zkumavkách je stabilní po dobu 28 dní, jestliže je uložena při teplotě 2–8 °C.

Nejnovější licenční informace a prohlášení o výrobku najdete v příbalovém letáku QuantiFERON-CMV.

## KONTAKTNÍ ÚDAJE



Cellestis, a QIAGEN Company

Asia-Pacific: [techservice-ap@qiagen.com](mailto:techservice-ap@qiagen.com)

Europe: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

Middle East / Africa: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

USA / Canada: [techservice-na@qiagen.com](mailto:techservice-na@qiagen.com)

Latin America (not including Brazil or Mexico):

[techservice-latam@qiagen.com](mailto:techservice-latam@qiagen.com)

Mexico: [techservice-MX@qiagen.com](mailto:techservice-MX@qiagen.com)

Brazil: [techsebr@qiagen.com](mailto:techsebr@qiagen.com)

[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com)

Ochranné známky: QIAGEN<sup>®</sup>, QuantiFERON<sup>®</sup> (skupina QIAGEN).

© 2010-2013 Cellestis; Veškerá práva vyhrazena

1075109CS Rev. 01 05/2013



Cellestis, a QIAGEN Company  
Level 2, Office Tower 2,  
Chadstone Centre  
1341 Dandenong Road  
Chadstone, Victoria, 3148, Austrálie



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Německo



---

Sample & Assay Technologies