

QuantiFERON®-CMV

①

Verinäyteputket

Yhden potilaan pakkaus

Tuotenumero 0192-0301

Käytettäväksi
QuantiFERON-CMV
ELISA -sarjan kanssa
(Tuotenumero 0350-0201).


SISÄLTÖ

3 x 1 ml QF CMV -verinäyteputket (Nil, CMV Antigen, Mitogen)
1 x pakkausseloste

Katso lisätietoja *QuantiFERON-CMV-pakkausselosteesta*, joka on saatavissa osoitteessa www.QuantiFERON.com.

VERINÄYTTEEN OTTO

②

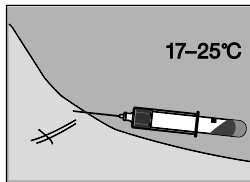

! VAROITUS:

- Normaleja sovellettavia verenkäsittelymenetelmiä on sovellettava.
- Näyteputkia voidaan säilyttää 4 °C – 25 °C asteessa, ja niiden on oltava käyttöhetkellä huoneenlämpöisiä (17 °C – 25 °C).

Ota verinäyte laskimopunktiolla.

Alipaine täyttää putken mustaan merkkiin (1 ml). Veren virtaus saattaa olla hidasta. Pidä näyteputkea neulassa 2–3 sekuntia verenvirtauksen lakattua. Toista näytteenotto näyteputkeen, jos täyttö ei ole lähelle merkkiä.


Tekninen vihje

Siipineulat – valmisteletetku tyhjällä putkella (ei mukana) ennen QuantiFERON-CMV-näyteputkien täyttöä.

VERINÄYTTEEN OTTO

③


Kääntelet näyteputkia välittömästi täytön jälkeen kymmenen (10) kertaa, jotta varmistetaan, että näyteputken koko pinta peittyy verellä, jotta antigeenit näyteputken seinämieltä liukenevat.

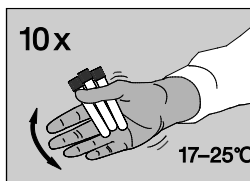


*Putkien tulee olla 17 °C – 25 °C lämpötilassa verinäytteen ottohetkellä.
Liiallinen ravistelu saattaa aiheuttaa geelin hajoamisen ja vääristyneet testitulokset.*

Merkitse näyteputket oikeilla etiketeillä.




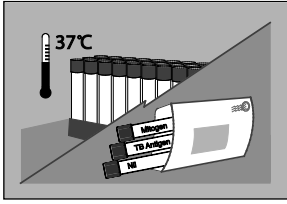


VAIHTOEHTO 1 Inkuboi laboratoriossa

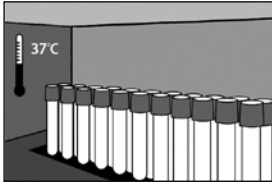

VAIHTOEHTO 2 Inkubointi näytteenottoaikassa

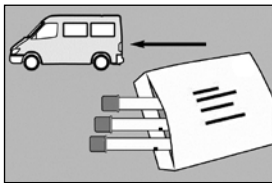

VAIHTOEHTO 2 (jatkuu)

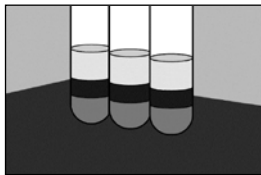

LÄHETYS / INKUBOINTI

④

Lähetä näyteputket laboratorioon 17 °C – 27 °C lämpötilaisina. Veri on inkuboitava mahdollisimman nopeasti 37 °C lämpötilassa (ja 16 tunnin sisällä näytteenotosta).

Laboratoriohenkilökunnan on käännettävä näyteputkia uudelleen välittömästi ennen inkubointia 37 °C lämpötilassa.

Tekninen vihje

Merkitse näyteputket merkinnällä "Ei inkuboitu".

LÄHETYS / INKUBOINTI

⑤

Veri on inkuboitava mahdollisimman pian (ja 16 tunnin sisällä näytteenotosta). Inkuboi näyteputkia pystyasennossa 37 °C lämpötilassa 16 – 24 tuntia.

QIAGEN voi toimittaa inkubaattorin.

Tekninen vihje

Kosteus/CO₂ ei vaadita.

Jos putkia ei inkuboida 37 °C lämpötilassa pian näytteenoton jälkeen, näyteputkien sisältö on sekoitettava juuri ennen inkubointia uudelleen kääntelemällä putkea 10 kertaa.

LÄHETYS / INKUBOINTI

⑥

Lähetä inkuboidut näyteputket testilaboratorioon (3 vuorokauden sisällä, jollei sentrifugoitu).

Säilytä näyteputket 4 °C – 27 °C lämpötilassa.

Tekninen vihje

Merkitse näyteputket merkinnällä "Inkuboitu".

SENTRIFUGOINTI

⑦

Sentrifugoi näyteputket ennen näytteiden analysointia.

Linkoa 2 000 G:n – 3 000 G:n keskipakoisvoimalla 15 minuutin ajan.

Sentrifugoitujen näyteputkien sisältämä plasma on vakaa 28 vuorokautta, kun ne säilytetään 2 °C – 8 °C lämpötilassa.

Ajan tasalla olevat käyttöoikeustiedot ja tuotekohtaiset vastuuvapauslausekkeet, katso QuantiFERON-CMV-pakkausseloste.

YHTEYSTIEDOT

⑧

Cellestis, a QIAGEN Company

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Tavaramerkit: QIAGEN®, QuantiFERON® (QIAGEN-ryhmä).

© 2010-2013 Cellestis, kaikki oikeudet pidätetään

1075109FI versio 01 05/2013



Cellestis, a QIAGEN Company
Level 2, Office Tower 2,
Chadstone Centre
1341 Dandenong Road
Chadstone, Victoria, 3148, Australia



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Saksa



Sample & Assay Technologies