

QuantiFERON®-CMV

①

Epruvete za prikupljanje krvi

Pakiranje za jednog pacijenta

Kataloški broj 0192-0301

Za primjenu s kompletom QuantiFERON-CMV ELISA (kataloški broj 0350-0201).

SADRŽAJ

Epruvete za prikupljanje krvi 3x 1 ml QF CMV (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1 Uputa proizvođača


Za više informacija proučite *Uputu proizvođača QuantiFERON-CMV*, koja se može naći na www.QuantiFERON.com.

PRIKUPLJANJE KRVI

②

⚠ UPOZORENJE:

- Vrijede standardne mjere opreza prilikom prikupljanja krvi.
- Epruvete se mogu pohraniti pri temperaturama 4 °C–25 °C i trebaju biti na sobnoj temperaturi (17 °C–25 °C) cijelo vrijeme uporabe.

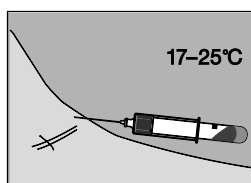

Prikupite krv venepunkcijom.


Primjenom vakuuma napunite epruvetu krvlju do crne oznake (1 ml). Protok krvi može biti spor. Držite epruvetu 2-3 sekunde nakon što krv prestane teći. Napunite istu epruvetu s više krvi, ako postojeća razina krvi u epruveti nije blizu oznake.

Tehnički savjet

Leptir igle – istisnite zrak iz epruvete praznom epruvetom (ne isporučuje se u kompletu) prije punjenja epruveta QuantiFERON-CMV.

PRIKUPLJANJE KRVI

Neposredno nakon punjenja epruveta protresite ih deset ③ (10) puta, dovoljno energično kako biste osigurali da je cijela unutarnja površina epruvete obložena krvlju kako bi se otopili antigeni na stijenjkama epruvete.

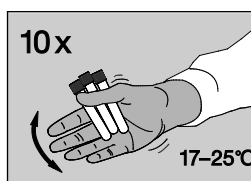


U vrijeme punjenja krvlju epruvete moraju biti na temperaturi od 17 do 25 °C.

Prejako protresivanje epruvete može uzrokovati remećenje gela i odstupanje u rezultatima.

Označite epruvete na odgovarajući način.



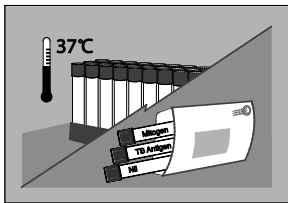


OTPREMA / INKUBACIJA

④

Otpremite epruvete u laboratorij pri temperaturi 17–27 °C. Krv treba što prije inkubirati pri temperaturi od 37 °C (te unutar 16 sati od prikupljanja).

Osoblje laboratorija treba ponovno promiješati epruvete neposredno prije inkubacije na 37 °C.

OPCIJA 1 Inkubacija u laboratoriju

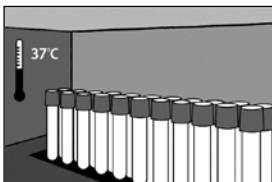


OTPREMA / INKUBACIJA

⑤

Krv treba što prije inkubirati (te unutar 16 sati od prikupljanja). Inkubirajte epruvete u uspravnom položaju pri temperaturi od 37 °C tijekom 16 do 24 sati.

Inkubatore je moguće nabaviti od tvrtke QIAGEN.

OPCIJA 2 Inkubacija na lokaciji prikupljanja

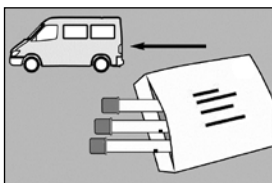

Tehnički savjet

Vlaga/CO₂ nije potreban.

Ako epruvete nisu inkubirane na 37 °C nakon prikupljanja, potrebno je ponovno promiješati epruvete prevrtanjem 10 puta neposredno prije inkubacije.

OTPREMA / INKUBACIJA

⑥


Otpremite inkubirane epruvete u laboratorij za testiranje (unutar 3 dana, ako nisu centrifugirane).

Epruvete čuvajte na temperaturi od 4 do 27 °C.

Tehnički savjet

Označite epruvete kao "Inkubirane".

OPCIJA 2 (nastavak)

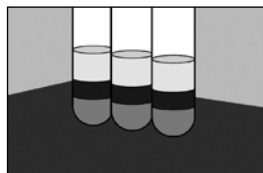

CENTRIFUGIRANJE

⑦

Prije uzorkovanja centrifugirajte epruvete.

Brzina centrifugiranja mora biti 2000-3000 g tijekom 15 minuta.

Plazma u centrifugiranim epruvetama stabilna je tijekom 28 dana kad se pohrani na 2 do 8 °C.

Za ažurirane informacije o licenciranju i izjave o odricanju odgovornosti za specifični proizvod proučite uputu proizvođača QuantiFERON-CMV ELISA.

INFORMACIJE ZA KONTAKT

⑧

Cellestis, a QIAGEN Company

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Zaštićene trgovačke marke: QIAGEN[®], QuantiFERON[®] (grupacija QIAGEN).

© 2010-2013 Cellestis, sva prava pridržana

1075109HR Rev. 01 05/2013



Cellestis, a QIAGEN Company
Level 2, Office Tower 2,
Chadstone Centre
1341 Dandenong Road
Chadstone, Victoria, 3148, Australija



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Njemačka



Sample & Assay Technologies