

QuantiFERON®-CMV

①

Tubi għall-Ġbir tad-Demm

Pakkett Wieħed għall-Pazjent

Nru tal-Katalgu 0192-0301

Għal użu b'kitt ta' QuantiFERON-CMV ELISA (Nru tal-katalgu 0350-0201).

WERREJ


3x 1 ml QF CMV tubi ta' ġbir tad-demmi (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x Fuljett tal-Pakkett

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok irreferi għall-*Fuljett tal-Pakkett ta' QuantiFERON-CMV* li jinsab f'www.QuantiFERON.com.

ĠBIR TA' DEMM

②

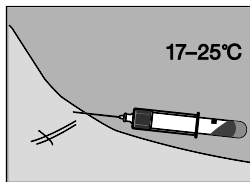

! TWISSIJA

- Prekawzjonijiet standard dwar il-ġbir tad-demmi japplikaw
- It-tubi jistgħu jinżammu f'temperatura ta' bejn 4°C-25°C u għandhom ikunu f'temperatura ambjentali (17°C-25°C) fil-ħin tal-użu.

Igbor id-demmi bil-venipuntura.

Il-vakwu jimla sal-marka s-sewda (1 ml). Il-fluss tad-demmi jista' jkun bil-mod. Ibqa' żomm it-tubu għal 2-3 sekondi wara li l-fluss jiegaf. Imla t-tubu b'aktar demm jekk ma tkunx ilħaqt il-marka.


Suġġeriment Tekniku

Labar tal-farfett - ipprajmja l-pajp b'tubu li tiskarta (mhux fornut) qabel ma timla t-tubi ta' QuantiFERON-CMV.

ĠBIR TA' DEMM

③

Eżatt wara li timla t-tubi, ħallathom għaxar (10) darbiet, biżżejjed biex tiżgura li l-wiċċ kollu ta' gewwa t-tubu jiġi miksi bidemmi sabiex l-antiġens jinħallu fuq l-uċuħ tat-tubu.

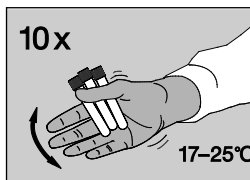


It-tubi għandhom ikunu f'temperaturi ta' 17-25°C fil-ħin li jimtlew bid-demmi.

Taħlit qawwi żżejjed jista' jikkawża sfaxxar fil-ġell u jista' jwassal għal riżultati anormali.


Immarka t-tubi b'mod xieraq.




Sample & Assay Technologies

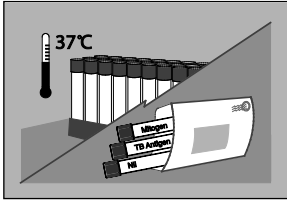


GHAŻLA 1
Inkuba fil-laboratorju

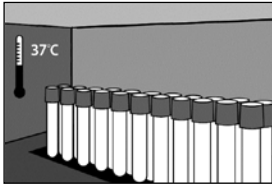

GHAŻLA 2
Inkuba fis-sit tal-ġbir.

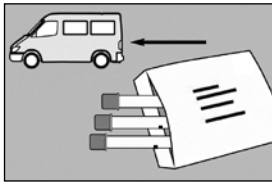

GHAŻLA 2 (jissokta)

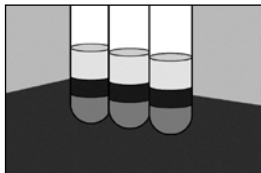

TRASBORD / INKUBAZZJONI

④

Ibgħat it-tubi lil-laboratorju f'temperatura ta' 17-27°C.

Id-demm irid ikun inkubat f'temperatura ta' 37°C kemm jista' jkun malajr (u fi żmien 16-il siegħa mill-ġbir)

L-istaff tal-laboratorju għandu jerġa' jhallat it-tubi qabel l-inkubazzjoni f'temperatura ta' 37°C.

Suġġeriment Tekniku

Immarka t-tubi bħala "Mhux Inkubati"

TRASBORD / INKUBAZZJONI

⑤

Id-demm irid jiġi inkubat kemm jista' jkun malajr (u fi żmien

16-il siegħa mill-ġbir). Inkuba t-tubi weqfin f'temperatura ta' 37°C għal 16-24 siegħa

Inkubaturi jistgħu jkunu disponibbli minn QIAGEN

Suġġeriment Tekniku

Umdità/CO₂ mhux meħtieġa

Jekk it-tubi ma jiġux inkubati f'temperatura ta' 37°C ffit wara l-ġbir, it-taħlit tat-tubi b'10 inverżjonijiet għandu jsir immedjatament qabel l-inkubazzjoni.

TRASBORD / INKUBAZZJONI

⑥

Ibgħat t-tubi inkubati għall-ittestjar fil-laboratorju (fi żmien 3 ijiem, jekk ma jiġux iċċentrifugati).

Żomm it-tubi f'temperaturi ta' bejn 4-27°C.

Suġġeriment Tekniku

Immarka t-tubi bħala "Inkubati".

ĊENTRIFUGAZZJONI

⑦

Iċċentrifuga t-tubi qabel ma tanalizza.

Dawwar b'2000-3000g għal 15-il minuta.

Il-plażma f'tubi ċentrifugati huwa stabbli għal 28 jum meta miżmum f'temperatura ta' 2-8°C.

Għal informazzjoni aġġornata dwar liċenzjar u tiċħid speċifiku dwar il-prodott, ara l-Fuljett ta' Informazzjoni fil-pakkett ta' QuantiFERON-CMV.

DETTALJI TA' KUNTATT



Cellestis, a QIAGEN Company

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Marki registrati QIAGEN[®], QuantiFERON[®] (QIAGEN Group).

© 2010-2013 Cellestis, kull dritt riżervat

1075109MT Rev. 01 05/2013



Cellestis, a QIAGEN Company
Level 2, Office Tower 2,
Chadstone Centre
1341 Dandenong Road
Chadstone, Victoria, 3148, L-Awstralja



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
II-Ġermanja



Sample & Assay Technologies