

## QuantiFERON®-CMV

①

### Blodprøvetakingsrør

Pakke til enkeltpasientbruk

Kat. nr. 0192-0301

Til bruk med  
QuantiFERON-CMV  
ELISA-sett (kat.nr. 0350-  
0201).

#### INNHold


3 x 1 ml QF CMV-blodprøvetakingsrør (Nil, CMV Antigen,  
Mitogen)

1 x pakningsvedlegg

Du finner mer informasjon i *QuantiFERON-CMV-  
pakningsvedlegget*, som er tilgjengelig på  
[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com).

#### BLODPRØVETAKING

②

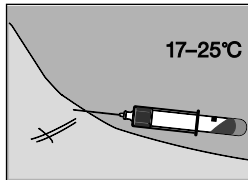

#### ⚠ ADVARSEL:

- Standard forholdsregler for håndtering av blod gjelder.
- Rørene kan oppbevares ved 4–25 °C og må holde romtemperatur (17–25 °C) på brukstidspunktet.

Ta blodprøver ved hjelp av venepunksjon.

*Vakuu fyller til det svarte merket (1 ml). Blodstrømmen kan gå sakte. Hold røret på nålen i 2–3 sekunder etter at strømmen stanser. Gjenta røret hvis det ikke er nært merket.*


#### Teknisk tips

Sommerfuglnåler – prime slangen med et renserrør (medfølger ikke) før du fyller QuantiFERON-CMV-rør.

#### BLODPRØVETAKING

③


Retten etter at rørene er fylt, skal de ristes ti (10) ganger, akkurat godt nok til at hele den innvendige overflaten av røret er dekket med blod, slik at antigen på rørveggene løses opp.

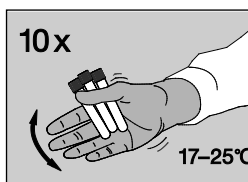

*Rørene skal holde 17–25 °C når de fylles med blod. For kraftig risting kan føre til gelforstyrrelse og feil resultater.*

*Rørene skal merkes riktig.*



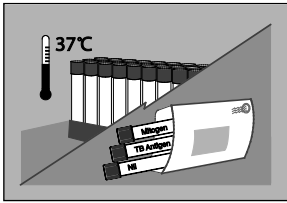

### TRANSPORT/INKUBERING

④

Send rørene til laboratoriet ved en temperatur på 17–27 °C. Blodet må inkuberes til 37 °C så snart som mulig (og innen 16 timer etter prøvetaking).


*Laboratiemedarbeidere må blande rørene på nytt umiddelbart før inkubering til 37 °C.*

#### Teknisk tips

Merk rørene som "Ikke inkubert".

#### ALTERNATIV 1

##### Inkuber ved laboratoriet

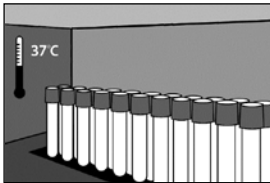

### TRANSPORT/INKUBERING

⑤

Blod må inkuberes så snart som mulig (og innen 16 timer etter prøvetaking). Inkuber rørene vertikalt ved 37 °C i 16–24 timer.

*Det kan være inkubatorer tilgjengelige fra QIAGEN.*


#### Teknisk tips

Fuktighet/CO<sub>2</sub> er ikke nødvendig.

#### ALTERNATIV 2

##### Inkuber ved prøvetakssteden

Hvis rørene ikke inkuberes ved 37 °C raskt etter prøvetaking, må rørene blandes på nytt ved å vende dem 10 ganger umiddelbart før inkubering.

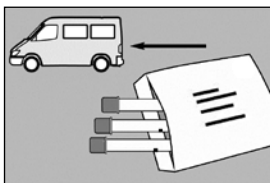

### TRANSPORT/INKUBERING

⑥


Send inkuberte rør til testlaboratoriet (innen 3 dager hvis de ikke er sentrifugert).

*Rørene skal holde 4–27 °C.*

#### Teknisk tips

Merk rørene som "Inkubert".

#### ALTERNATIV 2 (forts.)

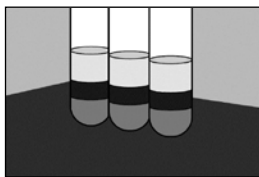

### SENTRIFUGERING

⑦

Sentrifuger rørene før prøvetaking.

*Spinn ved 2000–3000g i 15 minutter.*

Plasma i sentrifugerte rør er stabilt i 28 dager ved oppbevaring ved 2–8 °C.

Du finner oppdatert lisensinformasjon og produktspesifikke ansvarsfraskrivelser i pakningsvedlegget for QuantiFERON-CMV.

## KONTAKTINFORMASJON

⑧

Cellestis, a QIAGEN Company

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Varemerker: QIAGEN®, QuantiFERON® (QIAGEN-gruppen).

© 2010–2013 Cellestis. Med enerett.

1075109 Rev. 01 05/2013



Cellestis, a QIAGEN Company  
Level 2, Office Tower 2,  
Chadstone Centre  
1341 Dandenong Road  
Chadstone, Victoria, 3148, Australia



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Tyskland



---

Sample & Assay Technologies