

Určené na používanie so súpravou QuantiFERON-CMV ELISA (kat. č. 0350-0201).

QuantiFERON[®]-CMV

①

Skúmavky na odber krvi

Balenie pre jedného pacienta

Kat. č. 0192-0301

OBSAH


3 skúmavky na odber krvi QF CMV s objemom 1 ml (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1 príbalový leták

Ďalšie informácie nájdete v *príbalovom letáku ku QuantiFERON-CMV*, ktorý nájdete na adrese www.QuantiFERON.com.

ODBER KRVI

②

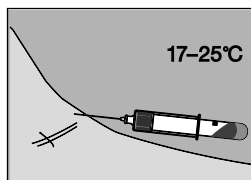

VAROVANIE:

- Postupujte podľa štandardných preventívnych opatrení týkajúcich sa manipulácie s krvou.
- Skúmavky je možné skladovať pri teplote 4 °C – 25 °C a v čase používania musia mať izbovú teplotu (17 °C – 25 °C).

Krv odoberte pomocou venepunkcie.


Podtlak vyplní časť skúmavky až po čiernu značku (1 ml). Prietok krvi môže byť pomalý. Po ukončení prietoku podržte skúmavku na ihle ďalšie 2 – 3 sekundy. Ak hladina nedosiahne značku, opakujte činnosť s novou skúmavkou.

Technická rada

Ihly s krídelkami – pred začatím plnenia skúmaviek QuantiFERON-CMV naplňte hadičku s odzdušňovacou skúmavkou.

ODBER KRVI

③

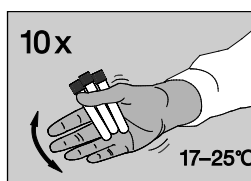

Ihneď po naplnení skúmaviek pretrepte ich obsah desať (10) krát, čo postačuje na to, aby sa vnútorný povrch skúmavky pokryl krvou a aby sa rozpustili antigény na stenách skúmavky.




V čase plnenia krvou by mala byť teplota skúmaviek 17 – 25 °C.

Nadmerné trepanie môže viesť k rozkladu gélu a k odchýlnym výsledkom.

Skúmavky správnym spôsobom označte.



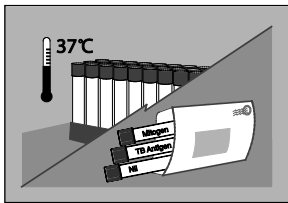

PREPRAVA/INKUBÁCIA


④

Preneste skúmavky do laboratória pri teplote 17 – 27 °C. Krv je potrebné čo najskôr (najneskôr však do 16 hodín od odberu) inkubovať pri teplote 37 °C.

Laboratórni pracovníci musia premiešať obsah skúmaviek bezprostredne pred inkubáciou s teplotou 37 °C.

MOŽNOSŤ 1

Inkubácia v laboratóriu

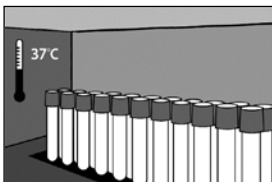

PREPRAVA/INKUBÁCIA

⑤

Krv je potrebné inkubovať čo najskôr (najneskôr však do 16 hodín od odberu). Skúmavky inkubujte vo vzpriamenej polohe pri teplote 37 °C po dobu 16 – 24 hodín.

Inkubátory možno zakúpiť od spoločnosti QIAGEN.


Technická rada

Nevyžadujú sa požadované hodnoty vlhkosti/CO₂.

Ak nebudete skúmavky inkubovať pri teplote 37 °C čo najskôr po odbere, bezprostredne pred samotnou inkubáciou je potrebné premiešať obsah skúmaviek (ich otočením 10-krát).

MOŽNOSŤ 2

Inkubácia na mieste odberu

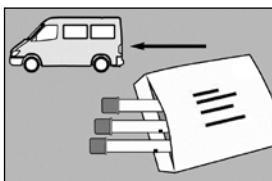

PREPRAVA/INKUBÁCIA

⑥

Prepravte inkubované skúmavky do testovacieho laboratória (do 3 dní, ak neboli odstredené).


Skúmavky uchovávajú v prostredí s teplotou 4 – 27 °C.

Technická rada

Skúmavky označte nadpisom „inkubované“.

MOŽNOSŤ 2

(pokračovanie)

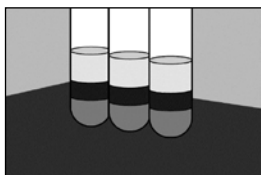

ODSTREĎOVANIE

⑦

Pred začatím analýzy vzoriek odstredte skúmavky.

Skúmavky odstredujte s otáčkami 2 000 – 3 000 g po dobu 15 minút.

Plazma v odstredených skúmavkách ostane stabilná po dobu 28 dní pri uchovávaní skúmaviek v prostredí s teplotou 2 – 8 °C.

Aktuálne licenčné informácie a právne informácie týkajúce sa produktu nájdete v príbalovom letáku k súprave QuantiFERON-CMV.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE



Cellestis, a QIAGEN Company

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Ochranné známky: QIAGEN[®], QuantiFERON[®] (skupina QIAGEN).

Autorské práva © 2010 – 2013 Cellestis. Všetky práva vyhradené.

1075109SK Ver. 01 05/2013



Cellestis, a QIAGEN Company
Level 2, Office Tower 2,
Chadstone Centre
1341 Dandenong Road
Chadstone, Victoria, 3148, Austrália



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Nemecko



Sample & Assay Technologies