

QuantiFERON®-CMV

①

Epruvete za odvzem krvi

Pakiranje za posameznega bolnika

Kat. št. 0192-0301

Za uporabo s
kompletom
QuantiFERON-CMV
ELISA (kat. št.
0350-0201).

VSEBINA


3 x 1 ml epruveta za odvzem krvi QF CMV (Nil, CMV Antigen,
Mitogen)

1x navodila za izdelek

Za več informacij preberite *Navodila za izdelek QuantiFERON-CMV*, ki so na voljo na naslovu www.QuantiFERON.com.

ODVZEM KRVI

②

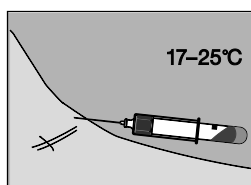

⚠ OPOZORILO:

- Veljajo običajni previdnostni ukrepi pri odvzemu krvi.
- Epruvete se lahko hranijo pri temperaturi 4–25 °C in morajo imeti sobno temperaturo (17–25 °C) v času uporabe.

Opravite odvzem krvi iz vene.

Zaradi vakuuma se epruveta napolni do črne oznake (1 ml). Tok krvi je lahko počasen. Ko se tok ustavi, držite epruveto na igli še 2–3 sekunde. Epruveto morate napolniti do oznake.


Tehnični nasvet

Igle z metuljčki – s prazno epruveto (ni priložena) zagotovite, da je cevka napolnjena s krvjo, preden uporabite epruvete QuantiFERON-CMV.

ODVZEM KRVI

③

Takoj, ko napolnite epruvete, jih desetkrat (10) stresite, in sicer dovolj močno, da je celotna notranja površina prekrita s krvjo in se antigeni na stenah epruvete pomešajo s krvjo.

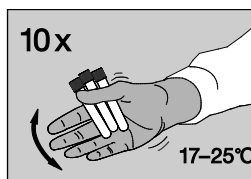


Epruvete morajo imeti v času polnjenja s krvjo temperaturo 17–25 °C.

Zaradi premočnega tresenja se lahko prekine zgoščevanje, kar lahko povzroči odklon pri rezultatih.


Epruvete ustrezno označite.




Sample & Assay Technologies

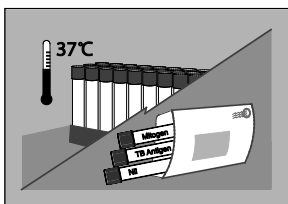


MOŽNOST 1
Inkubacija v laboratoriju

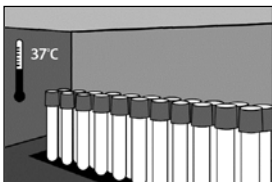

MOŽNOST 2
Inkubacija na mestu odvzema

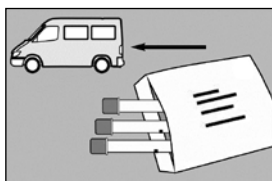

MOŽNOST 2
(nadaljevanje)

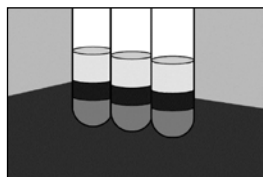

TRANSPORT/INKUBACIJA

④

Prenesite epruvete v laboratorij pri temperaturi 17–27 °C. Kri je treba čim prej dati v inkubacijo pri 37 °C (v 16 urah od odvzema).

Laboratorijsko osebje mora znova pretresti epruvete neposredno pred inkubacijo pri 37 °C.

Tehnični nasvet

Epruvete označite kot „Ni v inkubaciji“.

TRANSPORT/INKUBACIJA

⑤

Kri je treba čim prej dati v inkubacijo (v 16 urah od odvzema). Epruvete naj v inkubaciji stojijo pokončno pri 37 °C 16–24 ur.

Inkubatorje lahko zagotovi QIAGEN.

Tehnični nasvet

Raven vlažnosti/CO₂ ni predpisana.

Če epruvete niso v inkubaciji pri temperaturi 37 °C hitro po odvzemu krvi, jih je treba neposredno pred inkubacijo premešati, tako da se 10-krat obrnejo na glavo.

TRANSPORT/INKUBACIJA

⑥

Prenesite epruvete v inkubacijo v testni laboratorij (v roku 3 dni, če se ne centrifugirajo).

Epruvete ohranjajte na temperaturi 4–27 °C.

Tehnični nasvet

Epruvete označite kot „V inkubaciji“.

CENTRIFUGIRANJE

⑦

Epruvete pred jemanjem vzorcev centrifugirajte.

15 minut centrifugirajte pri centrifugalni sili 2000–3000 xg.

Plazma v centrifugiranih epruveh je stabilna do 28 dni, če se hrani pri temperaturi 2–8 °C.

Posodobljene informacije o licenciranju in zavrnitve odgovornosti za izdelek so na voljo v navodilih za izdelek QuantiFERON-CMV.

KONTAKTNE INFORMACIJE

⑧

Cellestis, QIAGEN Company

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Blagovne znamke: QIAGEN[®], QuantiFERON[®] (skupina QIAGEN).

© 2010–2013 Cellestis, vse pravice pridržane

1075109SL Rev. 01 05/2013



Cellestis, QIAGEN Company
Level 2, Office Tower 2,
Chadstone Centre
1341 Dandenong Road
Chadstone, Victoria, 3148, Avstralija



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Nemčija



Sample & Assay Technologies