

QuantiFERON®-CMV

①

Kan Alma Tüpleri

Tek Hasta Paketi

Kat. No. 0192-0301

İÇİNDEKİLER

3x 1 ml QF CMV kan alma tüpü (Nil, CMV Antigen, Mitogen)
1x Prospektüs

Daha fazla bilgi için, lütfen www.QuantiFERON.com adresinde bulunan *QuantiFERON-CMV Prospektüsü*'ne bakın.

QuantiFERON-CMV ELISA kitiyle (Kat. no. 0350-0201) kullanım için.

KAN ALMA

②

⚠ UYARI:

- Standart kan kullanımı önlemleri geçerlidir.
- Tüpler, 4–25°C sıcaklıkta depolanabilir ve kullanım sırasında oda sıcaklığında (17–25°C) olmalıdır.

Kanı damardan alın.

Siyah işarete (1 ml) kadar çekerek doldurun. Kan akışı yavaş olabilir. Akış kesildikten sonra tüpü 2–3 saniye iğnede tutun. İşarete yaklaşmadıysa tüpü doldurmaya devam edin.

Teknik İpucu

Kelebek iğneler—QuantiFERON-CMV tüplerini doldurmadan önce tüpleri bir tahliye tüpüyle (temin edilmez) hazırlayın.

KAN ALMA



③

Tüpler doldurulduktan hemen sonra tüpleri on (10) kez sallayın; antijenlerin tüp duvarlarında çözünmesi amacıyla tüpün iç yüzeyinin tamamen kanla kaplanmasına yetecek kadar güçlü bir şekilde sallayın.


Kan doldurma sırasında sıcaklık 17–25°C arasında olmalıdır.

Aşırı güçlü sallama jel bozunumuna ve anormal sonuçların alınmasına neden olabilir.

Tüpleri uygun şekilde etiketleyin.

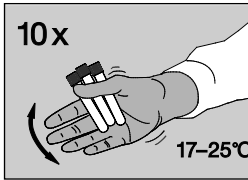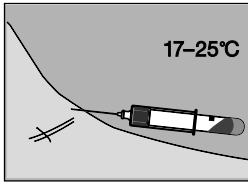

Sample & Assay Technologies

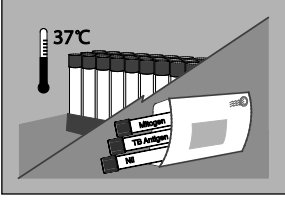

NAKLİYE / İNKÜBASYON


④

Tüpleri laboratuvara 17–27°C sıcaklıkta taşıyın. Kanın en kısa zamanda (ve kan alındıktan sonraki 16 saat içinde) 37°C'de inkübe edilmesi gerekir.

Laboratuvar görevlisinin tüpleri, 37°C inkübasyondan hemen önce yeniden karıştırması gerekir.

SEÇENEK 1

Laboratuvarda inkübe etme

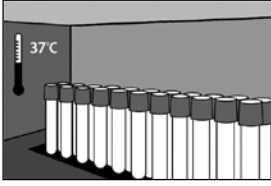

NAKLİYE / İNKÜBASYON

⑤

Kanın olabildiğince çabuk (ve alındıktan sonraki 16 saat içinde) inkübe edilmesi gerekir. Tüpleri dik olarak 37°C sıcaklıkta 16–24 saat süresince inkübe edin.


İnkübatörler QIAGEN'den edinilebilir.

Teknik İpucu

Nem/CO₂ gerekmez.

SEÇENEK 2

Alma yerinde inkübe etme

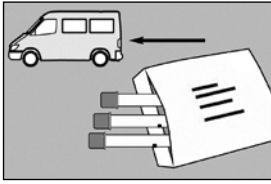

NAKLİYE / İNKÜBASYON

⑥


İnkübe tüpleri test laboratuvarına (santrifüj uygulanmamışsa 3 gün içinde) taşıyın.

Tüpleri 4–27°C sıcaklıkta tutun.

Teknik İpucu

Tüpleri “İnkübe” olarak etiketleyin.

SEÇENEK 2 (devam)

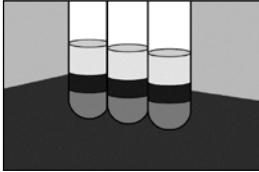

SANTRİFÜJ

⑦

Numune almadan önce tüpleri santrifüjleyin.

15 dakika süreyle 2000–3000 g hızında döndürün.

Santrifüjlü tüplerdeki plazma, 2–8°C sıcaklıkta saklandığında 28 gün boyunca stabildir.

Güncel lisans bilgileri ve ürüne özgü yasal uyarılar için ilgili QuantiFERON-CMV Prospektüsü'ne bakın.

İLGİLİ KİŞİ DETAYLARI

⑧

Cellestis, a QIAGEN Company

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Ticari markalar: QIAGEN®, QuantiFERON® (QIAGEN Grup).

© 2010-2013 Cellestis, tüm hakları saklıdır

1075109TR Rev. 01 05/2013



Cellestis, a QIAGEN Company
Level 2, Office Tower 2,
Chadstone Centre
1341 Dandenong Road
Chadstone, Victoria, 3148, Avustralya



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Almanya



Sample & Assay Technologies